

Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-IA2

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Analyse accréditée NON

Analyse sous-traitée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

Volume minimum

Serum/plasma : 500 ul

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur le serum/plasma : le même tube suffit.

Si cumul de recherche d'anticorps (anti-insuline et/ou anti-GAD) :
250ul de plasma/serum est nécessaire pour chaque anticorps.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



Monovette bouchon blanc - N° commande : 734811

Volume minimum

1 tube bien rempli

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si cumul de recherche d'anticorps (anti-insuline et/ou anti-GAD) :
augmenter le nombre de tubes ou le volume par tube.

250ul de plasma/serum est nécessaire pour chaque anticorps.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Analyseur DSX Automated ELISASystem (Dynex)

Technique RSR Limited



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3