

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hormone anti-Müllerienne (AMH)

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient Attention ! Analyse non prise en charge par l'assurance obligatoire des soins. Par sa prescription, le médecin atteste que le/la patient(e) en a été informé(e) et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.

Ajout d'analyse Oui

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution 1x/semaine (si demande en urgence, contacter le laboratoire)

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Hormone de régression müllerienne, MIS (Müllerian inhibiting substance)

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir Selon la version du bon, cocher l'analyse ou inscrire manuellement "AMH".

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Contenant(s) autre(s)

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



Monovette bouchon blanc - N° commande : 734811

Matériel néonatalogie

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Par transporteur : à T°
ambiante
Par poste : à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439



Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 411 / Roche Diagnostics



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 61

Condition(s) spéciale(s) Cette analyse ne fait pas partie de la liste des analyses (LA) prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS)