



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Inhibine B

Sang



## Informations générales

### Examen

#### Préparation du patient

Chez les femmes préménopausées, la détermination devrait être effectuée de manière standardisée entre J3 et J5 de leur cycle.  
Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que le patient a été informé et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Fréquence d'exécution

2x/mois

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

#### Volume minimum

1ml sérum

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

si AMH demandée également, un seul tube suffit

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

si AMH demandée également, 2 microtubes suffisent

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

centrifuger, décanter et congeler (volume minimum de sérum: 250ul)

#### Conservation

-20°C

#### Conditions d'acheminement

Envoyer congelé sur glace carbonique

### Acheminement

## Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

**Méthode analytique**

**Principe de la méthode**

- Immunoenzymatique

## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

68

**Condition(s) spéciale(s)**

Cette analyse ne fait pas partie de la liste des analyses (LA) prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS)