

Catalogue des analyses - Laboratoire

Inhibine B

Sang



Informations générales

Examen

Préparation du patient	Chez les femmes préménopausées, la détermination devrait être effectuée de manière standardisée entre J3 et J5 de leur cycle. Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que le patient a été informé et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Volume minimum 1ml sérum

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

si AMH demandée également, un seul tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



si AMH demandée également, 2 microtubes suffisent

Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation centrifuger, décanter et congeler (volume minimum de sérum: 250ul)

Conservation -20°C

Conditions d'acheminementEnvoyer congelé sur glace carbonique

Acheminement



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Méthode analytique

Principe de la méthode

• Immunoenzymatique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)

Cette analyse ne fait pas partie de la liste des analyses (LA) prises en charge parl'assurance obligatoire des soins (AOS)

