Catalogue des analyses - Laboratoire

Activité anti-facteur lla

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage de l'activité anti IIa pour le suivi des patients sous Argatroban

 $(Argatra \circledR), Dabigatran \, (Pradaxa \circledR) \, ou \, Bivalirudine \, (Angiox \circledR)$

Prestations simultanées: PTT, TT, D-dimères

Renseignement téléphonique 021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée

Spécialité • Hémostase

Synonyme Activité anti IIa, activité anti 2a

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999071 **Lien**

023 - Hématologie hémostatse

Renseignements à fournirPréciser l'anticoagulant, l'heure et la dose de l'injection

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Ouantité

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium





Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

Tube 1.4 ml citrate de sodium

Contenant

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Réfrigéré 6h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 **Préparation** heures sinon Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot aliquots à -20°C **Conservation** Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour **Conditions d'acheminement** les aliquots congelés **Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique** Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception Samedi: 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00




Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Activité anti IIa: Argatroban (Argatra®) µg/ml Dabigatran (Pradaxa®) ng/ml Bivalirudine (Angiox®) µg/ml
Méthode analytique	



Principe de la méthode

• Coagulant

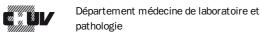

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

Tarif

Tarif (CHF) 40.5

