



Catalogue des analyses - Laboratoire

Activité anti-facteur IIa

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage de l'activité anti IIa pour le suivi des patients sous Argatroban (Argatral®), Dabigatran (Pradaxa®) ou Bivalirudine (Angiox®)
Prestations simultanées:
PTT, TT, D-dimères

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

• Hémostase

Synonyme

Activité anti IIa, activité anti 2a

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

023 - Hématologie hémostatse

Renseignements à fournir

Préciser l'anticoagulant, l'heure et la dose de l'injection

Pré analytique

Prélèvement

Nature

• Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

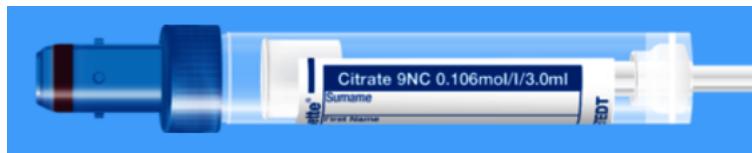

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium

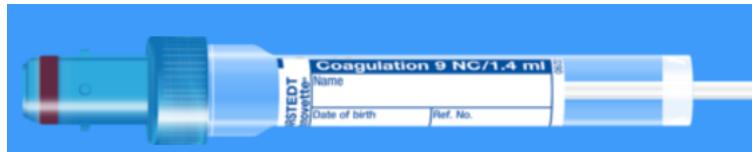

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

6h si plasma séparé

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation Activité anti IIa:
Argatroban (Argatra®) µg/ml
Dabigatran (Pradaxa®) ng/ml
Bivalirudine (Angiox®) µg/ml

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Coagulant



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

Tarif

Tarif (CHF) 40.5