Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Activité anti-facteur Xa**

### Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	Dosage de l'activité anti Xa pour le suivi des patients sous Héparine standard, Héparine de bas poids moléculaire (Clexane®, Fraxiparine®, Fragmine®, Danaparoïde (Orgaran®), Fondaparinux (Arixtra®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) ou Edoxaban (Lixiana®).  Attention: en présence de 2 molécules anti-Xa, le test de laboratoire ne permet pas de les différencier, elles sont cumulées dans le résultat rendu.  Prestations simultanées = PTT et TT selon l'anticoagulant.
Préparation du patient	Important pour HBPM (Fraxiparine, Clexane et Arixtra): La prise de sang de contrôle doit être faite entre 3 et 5 heures après l'injection Si injection sous cutanée (Orgaran ou héparine standard) prise de sang à mi-temps entre 2 injections
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Activité anti Xa, activité anti facteur X activé
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir	Cocher activité anti-Xa selon l'anticoagulant à contrôler. Dans "renseignements médicaux" , préciser l'heure et la dose de l'injection



### Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

**Réfrigéré** 6h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3

heures sinon

Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

**Conservation** aliquots à -20°C

**Conditions d'acheminement**Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour

les aliquots congelés

**Acheminement** 

**Dépose des prélèvements**Réception des laboratoires



Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	
Analytique Prestataire		
Prestataire	Hématologie générale 24/7	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne	
Adresse  Tube pneumatique	_	
	1011 Lausanne	
Tube pneumatique	1011 Lausanne 439	
Tube pneumatique  Horaire d'ouverture du laboratoire	1011 Lausanne 439 24h/24	
Tube pneumatique  Horaire d'ouverture du laboratoire  Téléphone	1011 Lausanne 439 24h/24 021 31 44 200	
Tube pneumatique  Horaire d'ouverture du laboratoire  Téléphone  Site web	1011 Lausanne 439 24h/24 021 31 44 200	
Tube pneumatique  Horaire d'ouverture du laboratoire  Téléphone  Site web  Résultats	1011 Lausanne 439 24h/24 021 31 44 200 Hématologie générale 24/7	
Tube pneumatique  Horaire d'ouverture du laboratoire  Téléphone  Site web  Résultats  Délai de rendu	1011 Lausanne  439  24h/24  021 31 44 200  Hématologie générale 24/7  < 2h  Paramètres testés: Activité anti-Xa HEP std U/ml, HBPN Orgaran U/ml, Arixtra ug/ml, Xarelto ng/ml, Eliquis ng/	



## Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

**Tarif** 

**Tarif (CHF)** 40.5

