

Catalogue des analyses - Laboratoire

Activité anti-facteur Xa

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage de l'activité anti Xa pour le suivi des patients sous Héparine standard, Héparine de bas poids moléculaire (Clexane[®], Fraxiparine[®], Fragmine[®], Danaparoïde (Orgaran[®]), Fondaparinux (Arixtra[®]), Rivaroxaban (Xarelto[®]), Apixaban (Eliquis[®]) ou Edoxaban (Lixiana[®]).

Attention : en présence de 2 molécules anti-Xa, le test de laboratoire ne permet pas de les différencier, elles sont cumulées dans le résultat rendu.

Prestations simultanées = PTT et TT selon l'anticoagulant.

Préparation du patient

Important pour HBPM (Fraxiparine, Clexane et Arixtra):

La prise de sang de contrôle doit être faite entre 3 et 5 heures après l'injection

Si injection sous cutanée (Orgaran ou héparine standard) prise de sang à mi-temps entre 2 injections

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Activité anti Xa, activité anti facteur X activé

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir

Cocher activité anti-Xa selon l'anticoagulant à contrôler. Dans "renseignements médicaux", préciser l'heure et la dose de l'injection

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Réfrigéré

6h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7.

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Paramètres testés: Activité anti-Xa HEP std U/ml, HBPM U/ml, Orgaran U/ml, Arixtra ug/ml, Xarelto ng/ml, Eliquis ng/ml, Lixiana ng/ml

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Colorimétrique
-------------------------------	--



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

Tarif

Tarif (CHF) 40.5