Catalogue des analyses - Laboratoire

RUNX1-RUNX1T1

Equivalent moléculaire translocation t(8;21)Ancien AML1-ETO



Informations générales

_			
C.,	-	-	-
EXa	m	е	n

But de l'analyse	Le RUNXI-RUNX1T1, (Anciennement AML1-ETO) correspond à l'équivalent moléculaire de la translocation chromosomique t(8;21) qui est recherché dans les LMA. L'analyse est complémentaire de l'analyse cytogénétique standard.
Renseignement téléphonique	021 31 44 209
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Oncohématologie
Synonyme	Translocations chromosomiques, T (8;21), RUNX1RUNX1T1
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale
Renseignements à fournir	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
Pré analytique	
Drálàvoment	

Prélèvement

Nature	 Moelle osseuse Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.
Matériel standard	
Quantité	3
Contenant	Tube 7.5 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans ı

Volume minimum

Sang: 20 ml Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biolo

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi: 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

PrestataireLaboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46

Tube pneumatique 439

Téléphone 021 31 44 209

Site web Hématologie moléculaire

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Interprétation Présent ou absent

en % de la valeur du prélèvement précédent

Méthode analytique

Principe de la méthode • RQ-PCR

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé ARN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF) 314.1

