Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticoagulant lupique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cette recherche se base sur l'interprétation de 2 analyses: DRVVT = temps de Russel dilué PTTLA = PTT lupus sensible Elle fait partie de la recherche d'anticorps antiphospholipides qui sont une famille hétérogène d'anticorps comprenant entre autre: anticorps anti-cardiolipine, anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1 et anticoagulants circulants de type lupique. Prestations simultanées: TP PTT TT FI
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Ac lupique, anticoagulant circulant lupique, DRVVT, temps de Russel
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse



Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 3

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Réfrigéré 12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationAucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3

heures sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminementLundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour

les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Prestataire	Laboratoire central d'hematologie Hemostase speciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Coagulant



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

