

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticoagulant lupique

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Cette recherche se base sur l'interprétation de 2 analyses:

DRVVT = temps de Russel dilué

PTTLA = PTT lupus sensible

Elle fait partie de la recherche d'anticorps antiphospholipides qui sont une famille hétérogène d'anticorps comprenant entre autre: anticorps anti-cardiolipine, anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1 et anticoagulants circulants de type lupique.

Prestations simultanées:

TP PTT TT FI

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 206

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

#### Synonyme

Ac lupique, anticoagulant circulant lupique, DRVVT, temps de Russel

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

#### Réfrigéré

12h si plasma séparé

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 206
<b>Astreinte</b>	Hémato moléculaire-hémostase
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	< 1 semaine
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coagulant</li> </ul>



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

6 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

88.2