



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1

(IgG, IgM)



Informations générales

Examen

But de l'analyse

La recherche des anticorps anti-beta2-glycoprotéines 1 fait partie de la recherche d'anticorps antiphospholipides qui sont une famille hétérogène d'anticorps comprenant entre autre: Anticorps anti-cardiolipines, anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1 et anticoagulants circulants de type lupique.

PRESTATIONS SIMULTANEES: TP PTT

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/mois

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Ac B2 GP 1, B2GP1

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

023 - Hématologie hémostatse

Renseignements à fournir

Motivation/reseignements cliniques sont essentiels

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

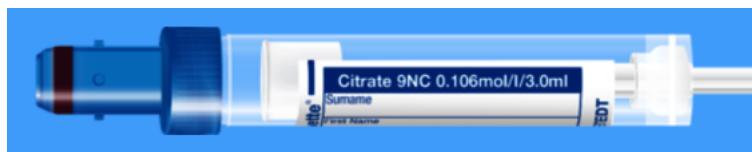

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Matériel pédiatrique

Quantité	1
-----------------	---

Contenant	Tube 3 ml citrate de sodium
	

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant	4h
Réfrigéré	12h si plasma séparé

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot
--------------------	--

Conservation	Aliquots à -20°C
---------------------	------------------

Conditions d'acheminement	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés
----------------------------------	---

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
--------------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
-------------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	----------------------------

Pneumatique	439
--------------------	-----

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
--	---



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 64.8