



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Anticorps anti-cardiolipine**

(IgG, IgM)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

La recherche des anticorps anti-cardiolipine fait partie de la recherche d'anticorps antiphospholipides qui sont une famille hétérogène d'anticorps comprenant entre autre: Anticorps anti-cardiolipines, anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1 et anticoagulants circulants de type lupique.

PRESTATIONS SIMULTANÉES: TP PTT

---

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 206

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Hémostase

---

#### Synonyme

Ac anti-cardiolipine, ac cardiolipine, anti-cardiolipine, anticorps anti-cardiolipine

---

#### Prescription

---

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999071

##### Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

---

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

---


#### Quantité

2

---

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

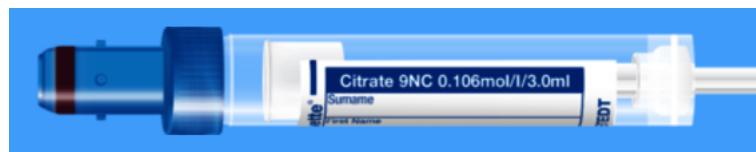

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

## Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 3 ml citrate de sodium 

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

## Stabilité maximale avant envoi

<b>Ambiant</b>	4h
<b>Réfrigéré</b>	12h si plasma séparé

## Traitements du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot
<b>Conservation</b>	Tube primaire à température ambiante aliquots à -20°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

## Acheminement

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaires d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ELISA

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 52.2