



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-cardiolipine

(IgG, IgM)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

La recherche des anticorps anti-cardiolipine fait partie de la recherche d'anticorps antiphospholipides qui sont une famille hétérogène d'anticorps comprenant entre autre: Anticorps anti-cardiolipines, anticorps anti-beta2 glycoprotéines 1 et anticoagulants circulants de type lupique.
PRESTATIONS SIMULTANÉES: TP PTT

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Ac anti-cardiolipine, ac cardiolipine, anti-cardiolipine, anticorps anti-cardiolipine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

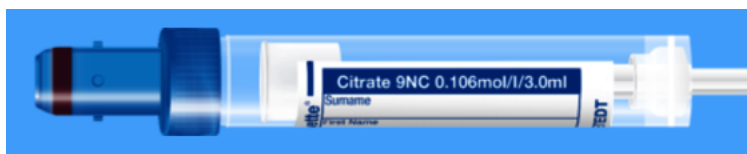

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Tube primaire à température ambiante
aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 52.2