

Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-PF4-héparine

Informations générales

Examen

But de l'analyse Détection d'anticorps anti-PF4 en cas de TIH

Renseignement téléphonique 021 31 44 206

Rendez-vous téléphonique nécessaire Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Hémostase

Synonyme Ac PF4, anticorps-PF4, facteur 4 plaquettaire, PF4

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999071
Lien
[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir Anticoagulant administré

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

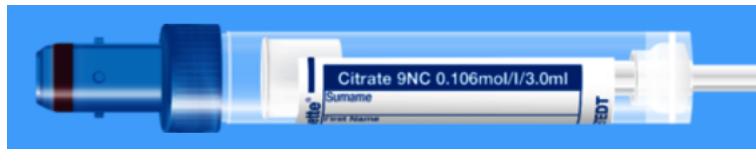

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

8h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures

sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 24h

Interprétation Négatif ou positif

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 130.5