

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Anticorps anti-PF4-héparine

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Détection d'anticorps anti-PF4 en cas de TIH

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 206

#### Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55  
62 117

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

#### Synonyme

Ac PF4, anticorps-PF4, facteur 4 plaquettaire, PF4

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061177

Lien

[023 - Hématologie routine](#)

#### Renseignements à fournir

Anticoagulant administré

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

#### Réfrigéré

8h si plasma séparé

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00**Téléphone**

021 31 44 206

**Astreinte**

Hémato moléculaire-hémostase

**Résultats****Délai de rendu**

&lt; 24h

**Interprétation**

Négatif ou positif

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- ELISA



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 130.5