Catalogue des analyses - Laboratoire

Antithrombine fonctionnelle

Informations générales

| C | - | _ | - |
|-----|---|---|---|
| FY2 | m | 0 | п |
| | | | |

| Ajout d'analyse | Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois |
|----------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 206 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | • Hémostase |
| Synonyme | Anti-thrombine, antithrombine, antithrombine III, antithrombine 3, AT III, AT3 |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u> |
| Renseignements à fournir | Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen Noter si le patient à reçu une anticoagulation ou asparaginase |
| Drá analytique | |

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium





Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

Tube 3 ml citrate de sodium

Citrate 9NC 0.106mol/l/3.0ml

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3

Stabilité maximale avant envoi

Préparation

Ambiant 4h

Réfrigéré 12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot Aliquots à -20°C Conservation Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour **Conditions d'acheminement** les aliquots congelés **Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100 Site Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Pneumatique** Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception Samedi: 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

| Téléphone | 021 31 44 280 |
|------------------------------------|--|
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |
| Analytique Prestataire | |
| Prestataire | Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 206 |
| Astreinte | Hémato moléculaire-hémostase |
| Résultats | |
| Délai de rendu | < 1 mois |
| Interprétation | Antithrombine fonctionnelle en % |
| Méthode analytique | |

• Chromogène



Principe de la méthode

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

