

Catalogue des analyses - Laboratoire

Antithrombine fonctionnelle

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Hémostase
Synonyme	Anti-thrombine, antithrombine, antithrombine III, antithrombine 3, AT III, AT3
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	<p>Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen</p> <p>Noter si le patient à reçu une anticoagulation ou asparaginase</p>

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

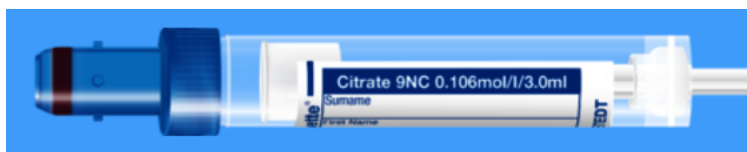

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

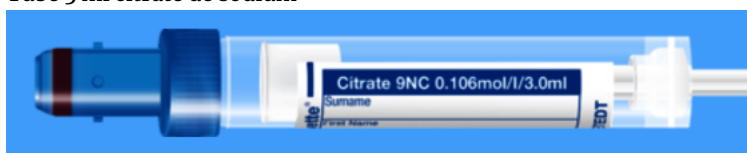

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Interprétation Antithrombine fonctionnelle en %

Méthode analytique

Principe de la méthode • Chromogène



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

18.9