

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Antithrombine fonctionnelle

## Informations générales

### Examen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Ajout d'analyse</b>            | Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois   |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 44 206   |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire   |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/semaine  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Spécialité</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hémostase</li></ul>   |
| <b>Synonyme</b>                   | Anti-thrombine, antithrombine, antithrombine III, antithrombine 3, AT III, AT3  |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>999071<br><b>Lien</b><br><a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>  |
| <b>Renseignements à fournir</b>   | Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen<br>Noter si le patient à reçu une anticoagulation ou asparaginase |

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

## Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

## Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

4h

**Réfrigéré**

12h si plasma séparé

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

**Conservation**

Aliquots à -20°C

**Conditions d'acheminement**

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 mois

**Interprétation** Antithrombine fonctionnelle en %

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Chromogène



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 18.9