

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Complexe thrombine antithrombine

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 206
<b>Rendez-vous téléphonique nécessaire</b>	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/mois
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hémostase</li></ul>
<b>Synonyme</b>	TAT
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


#### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

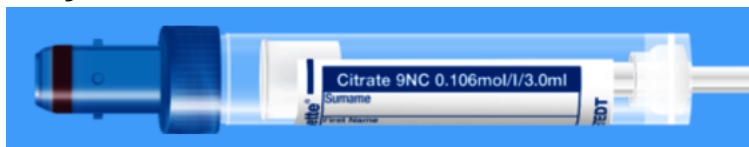

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993


#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

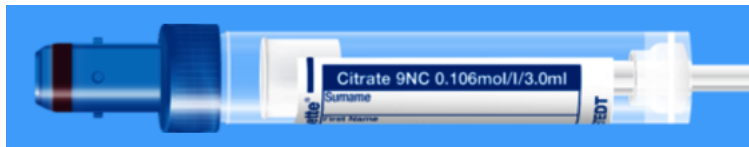

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

### Stabilité maximale avant analyse

#### Ambiant

4h

#### Réfrigéré

12h si plasma séparé

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 206
<b>Astreinte</b>	Hémato moléculaire-hémostase
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	< 1 mois
<b>Interprétation</b>	Prestations simultanées TP, PTT, TT, FI, F1 + 2
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ELISA</li></ul>
<b>Post analytique</b>	
<b>Conservation après examens</b>	
<b>Aliquote congelé</b>	6 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	50.4