Catalogue des analyses - Laboratoire

Complexe thrombine antithrombine

Informations générales

Examen

Rendez-vous téléphonique
Rendez-vous téléphonique
62 117

Horaire de réalisation

Fréquence d'exécution

Analyse accréditée

Spécialité

TAT

11 est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55
62 117

Heures ouvrables du laboratoire

1x/mois

OUI

TAT

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999071 **Lien**

<u>023 – Hématologie hémostatse</u>

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 2

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium





Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Tube 3 ml citrate de sodium

Citrate 9NC 0.106mol/1/3.0ml

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Réfrigéré 12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot		
Conservation	Aliquots à -20°C		
Conditions d'acheminement	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés		
Acheminement			
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires		
Site	BH18-100		
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne		
Pneumatique	439		
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00		
Téléphone	021 31 44 280		
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde		



Astreinte

dec	laborato	nires I	CC-	I CH
ues.	ιαυυιαιι	шеот		ьсп

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Interprétation

Prestations simultanées
TP, PTT, TT, FI, F1 + 2

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 50.4

