Catalogue des analyses - Laboratoire

D-dimères

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Exclusion de l'embolie pulmonaire et/ou de la thrombose veineuse profonde CIVD
Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	DDIME, D-dimères ELISA, PDF, produit de dégrad. fibrine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationAucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3

heures sinon

Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminementLundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour

les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 2h
Interprétation	D-dimères ng/ml
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ELISA



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

Tarif

Tarif (CHF)

