



Catalogue des analyses - Laboratoire

D-dimères

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Exclusion de l'embolie pulmonaire et/ou de la thrombose veineuse profonde CIVD
Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hémostase
Synonyme	DDIME, D-dimères ELISA, PDF, produit de dégrad. fibrine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	Hématologie générale 24/7

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	D-dimères ng/ml
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• ELISA



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

Tarif

Tarif (CHF) 28.8