Catalogue des analyses - Laboratoire

# Facteurs de coagulation (activité fonctionnelle)

## Informations générales

Cva	-	_	
Exa		u	ш

But de l'analyse	Les facteurs de coagulation comprennent: FII, FV, FVII, FX, FVIII, FIX, FXI, FXII, FXIII
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	Crase spéciale, facteur extrinsèque, facteur intrinsèque, grande crase, hémostase tests complémentaire, hémostase tests spéciaux, investigation PTT pathologique, investigation TP pathologique,
Prescription	
Formulaire de demande	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Formulaire de demande  Renseignements à fournir	999071 <b>Lien</b>
	999071 <b>Lien</b> <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir	999071 <b>Lien</b> <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir  Pré analytique	999071 <b>Lien</b> <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Renseignements à fournir  Pré analytique  Prélèvement	1 Lien 1023 - Hématologie hémostatse  Motivation/renseignements cliniques sont essentiels



**Contenant** 

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

#### Les mêmes tubes suffisent

### Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium

1



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

#### Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

**Réfrigéré** 12h si plasma séparé

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3

heures sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

**Conservation** Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour

les aliquots congelés

**Acheminement** 

**Dépose des prélèvements**Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Prestations simultanées: TP, PTT, TT, FI
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Coagulant



# Post analytique

#### Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

**Tarif** 

Tarif (CHF)

