

Catalogue des analyses - Laboratoire

Fibrinogène

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

FI, fibri

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

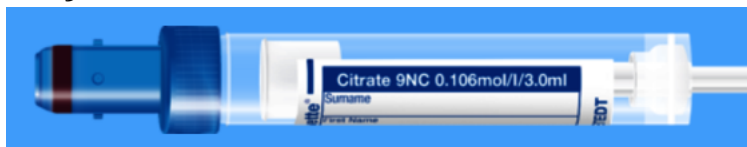

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaires d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>

Résultats

Délai de rendu < 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode • Néphélométrie



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

24 heures

Tarif

Tarif (CHF)

12.42