

Catalogue des analyses - Laboratoire

Test de falciformation

Dépistage drépanocytose (qualitatif)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cette analyse a pour but le **dépistage** de la drépanocytose (hémoglobinopathie) et le résultat est qualitatif (présence ou absence). Il n'est pas adapté pour le suivi de la drépanocytose (voir fiche Electrophorèse de l'hémoglobine).

Renseignement téléphonique

021 31 44 212

Horaire de réalisation

24h/24

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Synonyme

Drépanocytes, drépanocytose, érythrocytes, globules rouges, Hb S, falciforme, hémoglobine S, HBS

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061177

Lien

[023 - Hématologie routine](#)

Autre formulaire de demande

Numéro de commande

061189

Lien

[024 - Hématologie urgent](#)

Renseignements à fournir

cocher HbS (qualitatif)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

72h

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

| | |
|---|--|
| Prestataire | Laboratoire d'hématologie spéciale |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | Hématologie spéciale |
| Résultats | |
| Délai de rendu | < 24h |
| Interprétation | Positif (présence d'érythrocytes falciformés) ou négatif (absence d'érythrocytes falciformés) |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | <ul style="list-style-type: none">• Incubation en milieu réducteur métabisulfite de Na |
| Post analytique | |
| Conservation après examens | |
| Prélèvement primaire | 24 heures à température ambiante |
| Tarif | |
| Tarif (CHF) | 13.59 |