

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Maladie de von Willebrand

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Cette recherche se base sur l'interprétation de 3 prestations:

Facteur VIII = FVIII

Facteur von Willebrand antigénique = FWAG

Facteur von Willebrand activé

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 206

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

#### Synonyme

Cofacteur, cofacteur à la ristocétine, Facteur von Willebrand, Facteur FW, RCO, von Willebrand, vWAg, Willebrand

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061177

Lien

[023 - Hématologie routine](#)

#### Renseignements à fournir

Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen SI le patient a reçu une anticoagulation

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Les mêmes tubes suffisent

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

### Matériel néonatalogie

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

#### Réfrigéré

12h si plasma séparé

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures

sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C



<b>Conditions d'acheminement</b>	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

# Analytique

## Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

## Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

**Interprétation** Facteurs VIII antigénique %  
Facteurs VW coagulant %  
Facteurs VW activité %  
Prestations simultanées: TP, PTT, TT, FI

## Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Aggrégation

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 81