

Catalogue des analyses - Laboratoire

Maladie de von Willebrand

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cette recherche se base sur l'interprétation de 3 prestations:

Facteur VIII = FVIII

Facteur von Willebrand antigénique = FWAG

Facteur von Willebrand activé

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Cofacteur, cofacteur à la ristocétine, Facteur von Willebrand, Facteur FW, RCO, von Willebrand, vWAg, Willebrand

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostase](#)

Renseignements à fournir

Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen
SI le patient a reçu une anticoagulation

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent


Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

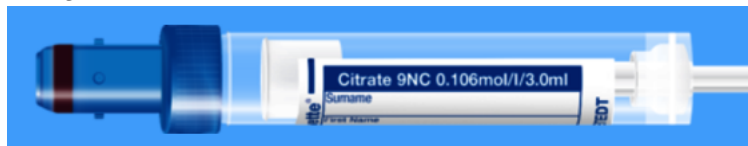

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures sinon Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot
Conservation	Aliquots à -20°C
Conditions d'acheminement	Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Interprétation	Facteurs VIII antigénique % Facteurs VW coagulant % Facteurs VW activité % Prestations simultanées: TP, PTT, TT, FI
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • Aggrégation
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	81