

Catalogue des analyses – Laboratoire

Malaria

Malaria dépistage Malaria positive (suivi)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dépistage: le test rapide de dépistage est effectué par le laboratoire d'hématologie. Après analyse, transmission du test de dépistage et lames au laboratoire de parasitologie tél 079 55 60 348.
L'analyse de parasitologie comprend un examen microscopique, le diagnostic de l'espèce et la détermination de la densité parasitaire (P. falciparum uniquement). Une PCR rapide (screening) ou une PCR multiplex de confirmation complète l'analyse.
Suivi de malaria positive: le test de dépistage et la PCR ne sont pas répétés.

Indication diagnostique

Présence d'un pic fébrile, retour d'un pays endémique pour la malaria

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Synonyme

Recherche de Malaria falciparum, malariae, ovale ou vivax,

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 – Hématologie hémostase](#)

Autre formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 – IMU – Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Bon de microbiologie complètement rempli

Recommandations

Pour les demandeurs externes:
Veuillez acheminer le tube de sang le plus rapidement possible.



Si le tube ne peut pas nous parvenir dans les 6h, veuillez nous fournir également en plus du tube de sang : le test rapide (ou une photocopie), deux frottis minces colorés au MGG et deux frottis minces non-colorés.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même monovette avec "autres éléments de FSS"

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

6h

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web [Hématologie générale 24/7.](#)

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation Test de dépistage: positif négatif
Résultat de la microscopie: transmis par le laboratoire de parasitologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Microscopie

Technique Test rapide: SD BIOLINE Malaria Ag P.f./Pan



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

Tube transmis au laboratoire de parasitologie

Tarif

Tarif (CHF)

8.1

Condition(s) spéciale(s)

Le laboratoire d'Hématologie facture le test rapide.

Les autres analyses seront facturées par le laboratoire de Microbiologie