Catalogue des analyses - Laboratoire

Malaria


Malaria dépistage Malaria positive (suivi)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage: le test rapide de dépistage est effectué par le laboratoire d'hématologie. Après analyse, transmission du test de dépistage et lames au laboratoire de parasitologie tél 079 55 60 348. L'analyse de parasitologie comprend un examen microscopique, le diagnostic de l'espèce et la détermination de la densité parasitaire (P. falciparum uniquement). Une PCR rapide (screening) ou une PCR multiplex de confirmation complète l'analyse. Suivi de malaria positive: le test de dépistage et la PCR ne sont pas répétés.
Indication diagnostique	Présence d'un pic fébrile, retour d'un pays endémique pour la malaria
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Hématologie cellulaire
Synonyme	Recherche de Malaria falciparum, malariae, ovale ou vivax,
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
Autre formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Bon de microbiologie complètement rempli
Recommandations	Pour les demandeurs externes: Veuillez acheminer le tube de sang le plus rapidement possible.



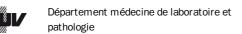

Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00200

V16 - 22/10/2025

Si le tube ne peut pas nous parvenir dans les 6h, veuillez nous fournir également en plus du tube de sang : le test rapide (ou une photocopie), deux frottis minces colorés au MGG et deux frottis minces non-colorés.



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même monovette avec "autres éléments de FSS"

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 6h

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne


Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception ^{24h/24}



Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	
Analytique		
Prestataire		
Prestataire	Hématologie générale 24/7	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24	
Téléphone	021 31 44 200	
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>	
Résultats		
Délai de rendu	< 2h	
Interprétation	Test de dépistage: positif négatif Résultat de la microscopie: transmis par le laboratoire	de parasitologie
Méthode analytique		
Principe de la méthode	Microscopie	
Technique	Test rapide: SD BIOLINE Malaria Ag P.f./Pan	



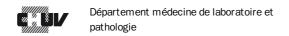

Post analytique

Conservation après examens

Tube transmis au laboratoire de parasitologie Prélèvement primaire

8.1

Tarif

Tarif (CHF)

Le laboratoire d'Hématologie facture le test rapide. Condition(s) spéciale(s) Les autres analyses seront facturées par le laboratoire de Microbiologie

