

Catalogue des analyses - Laboratoire

Marqueurs immunologiques

Informations générales

Examen

But de l'analyse

le laboratoire spécialisé d'hématologie effectue l'analyse des marqueurs immunologiques dans le cadre des hémopathies malignes, de la recherche d'hémoglobininurie paroxystique nocturne et dans la détermination des cellules souches CD34. Pour ces deux dernières applications voir les fiches correspondantes, respectivement code de recherche "HPN" et "CD34".

Les dosages de CD4/CD8 dans le cadre du suivi HIV, de même que les marqueurs dans le cadre des immunodéficiences sont effectués par le service d'immunologie.

Indication diagnostique

Immunophénotypisation par cytométrie de flux dans les cas de lymphocytose, recherche de lymphomes, monocytoses, leucémies aiguës, recherche de cellules blastiques dans les cas de Syndromes myélodysplasiques (SMD), Néoplasie myéloproliférative (NMP),

Renseignement téléphonique

021 31 44 212

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Oncohématologie

Synonyme

Immunophénotypisation, lymphocytaire, marqueurs immunocellulaires, marqueurs lymphocytaires, typisation

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire

Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44212

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)
- Moelle osseuse
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

Pour une analyse sur LCR, impérativement appeler le laboratoire à l'avance au 44212. Doit impérativement être transmis au laboratoire avant 16h00.

Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999011

Contenant(s) autre(s)

Pour les LCR – Tubes stériles – Falcon – 15 ml – Bouchon bleu

Volume minimum

Sang: 20 ml

Moelle: 2 à 3 ml

LCR: 10 ml sur tubes stériles – Falcon – 15 ml – Bouchon Bleu

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Impérativement température ambiante

Conditions d'acheminement

Annoncer l'envoi au 021 31 44 212
par coursier ou courrier express

Acheminement

Conditions d'acheminement	Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	Marqueurs immunologiques cellulaires
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Cytométrie de flux
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	24 heures à température ambiante