Catalogue des analyses - Laboratoire

Médullogramme

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 212
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117. C'est l'hématologue qui effectue le prélèvement où le pédiatre pour les enfants. Le rendez-vous pour la ponction est géré par le laboratoire: 021 31 44 212.
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Hématologie cellulaire
Synonyme	coloration cytochimiques, examen de la moelle osseuse, hématopoïèse, moelle, moelle hématopoïétique, moelle osseuse, myélogramme
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale
Renseignements à fournir	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
Recommandations	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44212



Pré analytique

Prélèvement

• Moelle osseuse

Instruction(s) particulière(s)Il faut prélever 2 à 3 ml de moelle seulement mais sur un tube de 7.5 ml.

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Moelle: 4h Frottis de moelle non colorés: variable

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminementEnvoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminementLe vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode • Coloration panoptique et cytochimiques



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

Moelle: 24 heures à 4°C

Frottie pap colorée: 3 m

Frottis non colorés: 2 mois à température ambiante

Frottis colorés: 10 ans

Tarif

Tarif (CHF)

