

Catalogue des analyses - Laboratoire

Monomères de fibrine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Permet le diagnostic de la CIVD
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hémostase
Synonyme	CIVD, FM,
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostase
Renseignements à fournir	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen

Pré analytique

Prélèvement


Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium

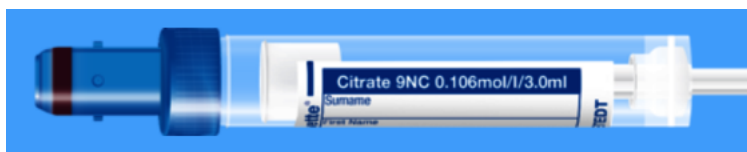

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 24h

Interprétation Monomère de fibrine : négatif ou positif
Prestations simultanées: TP;PTT, TT, FI
Généralement associés aux D-dimères.

Méthode analytique

Principe de la méthode • Agglutination



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

28.8