



Catalogue des analyses - Laboratoire

NPM1

Mutation NPM1

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Des mutations au niveau de l'exon 12 du NPM1 sont présentes dans 50 à 60% des cas de LMA à caryotype normal, et leur confèrent un bon pronostic en l'absence d'autres anomalies moléculaires.

L'analyse permet de mettre en évidence, par PCR, les mutations les plus fréquentes des insertions de 4 nucléotides, puis de les identifier par séquençage, dans la plupart des cas de NPM-1 muté pourra alors être quantifié par RQ-PCR pour le suivi de la maladie résiduelle.

Renseignement téléphonique

021 31 44 209

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Oncohématologie

Synonyme

LMA caryotype normal, nucleophosmin

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire

Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

Matériel standard

Quantité

3

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

Volume minimum

Sang: 20 ml
Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Téléphone 021 31 44 209

Site web [Hématologie moléculaire](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Interprétation Présent ou absent
en % de la valeur du diagnostic

Méthode analytique

Principe de la méthode • RQ-PCR



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

ARN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF)

393.3

Condition(s) spéciale(s)

Le tarif varie fortement en fonction des analyses réalisées