

Catalogue des analyses - Laboratoire

Peptide d'activation prothrombine (F1+2)

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117

Heure de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/mois

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Fragment F1 F2, F1 F2

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

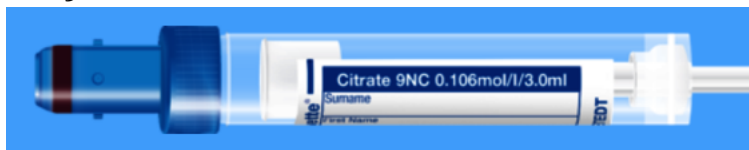

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

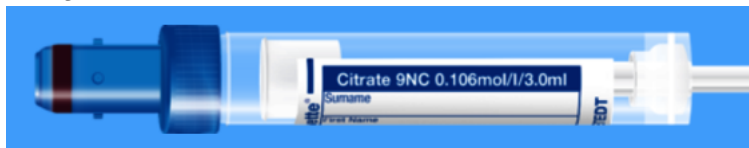

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 1 mois
Interprétation	Prestations simultanées: TP, PTT, TT, FI, TAT
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • ELISA
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	50.4