

Catalogue des analyses - Laboratoire

PFA P2Y

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Analyse rapide de l'efficacité des inhibiteurs du récepteur ADP P2Y₁₂ (ex: Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor) par le mesure d'un temps d'occlusion sur sang complet.
Sur le bon 023 - Hématologie cocher l'analyse "Résistance aux antiplaquettaires"

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

PFA, P2Y, P2Y₁₂

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostase](#)

Autre formulaire de demande

Lien

[LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires](#)

Renseignements à fournir

Indiquer l'antiagrégant administré(dose, date, heure)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3,8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3,8 ml citrate de sodium - tamponné



Monovette bouchon bleu ciel - N°commande : 738482

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Acheminement

Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation Temps d'occlusion P2Y en secondes

Méthode analytique

Principe de la méthode • Automate PFA -200

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 49.5