

Catalogue des analyses - Laboratoire

Pink test - Test obsolète - Remplacé par Test au 5EMA

Informations générales

Examen

But de l'analyse Le Pink test est un test de dépistage de la sphérocytose héréditaire

Renseignement téléphonique 021 31 44 212

Rendez-vous téléphonique nécessaire Annoncer l'examen au 021 31 44 212

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Hématologie cellulaire

Synonyme Sphérocytose, sphérocytose héréditaire, test de lyse érythrocytaire

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999071
Lien
[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Acheminement

Conditions d'acheminement

Doit parvenir au laboratoire dans les 3 heures qui suivent le
prélèvement Immédiatement par transporteur
Ne pas utiliser la poste pneumatique. Doit parvenir au laboratoire
avant 15h00. Annoncer l'envoi par téléphone

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'hématologie spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> jeudi : 8h00 à 17h00 Vendredi : 8h00 à 12h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	Hématologie spéciale
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Hémolyse en présence de Glycérol
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	24 heures à température ambiante
Tarif	
Tarif (CHF)	26.1