

Catalogue des analyses - Laboratoire

Protéine C fonctionnelle

Informations générales

Examen

Préparation du patient

Absence d'anticoagulation orale (AVK/Sintrom)

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 1 mois

Renseignement téléphonique

021 31 44 206

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

Co facteur protéine C, PCF, protéine C, protéine C fonctionnelle

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien[023 - Hématologie hémostatse](#)

Renseignements à fournir

Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

2

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

4h

Réfrigéré

12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu	< 1 semaine
Interprétation	Prestations simultanées: TP, PTT
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Chromogène



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 46.8