



Catalogue des analyses - Laboratoire

## Réarrangements TCRG (clonalité)

Réarrangement des gènes du recept. cell. T chaines gamma

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Détection d'une expansion clonale éventuelle chaîne gamma

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 209

**Rendez-vous téléphonique nécessaire** Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117

**Heure de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Oncohématologie

**Synonyme** TCRG, récepteur

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Info**  
Disponible au laboratoire  
**Lien**  
[026 - Hématologie spéciale](#)

**Renseignements à fournir** Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

**Recommandations** Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

#### Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

#### Volume minimum

Sang: 20 ml  
Moelle: 2 à 3 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

48h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

|  |  |
|--|--|
| <b>Site</b>                                | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Pneumatique</b>                         | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                            | <a href="#">Réception des laboratoires</a>   |

## Analytique

### Prestataire

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Prestataire</b>      | Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire |
| <b>Site</b>             | BH18-100  |
| <b>Adresse</b>          | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne                         |
| <b>Tube pneumatique</b> | 439   |
| <b>Téléphone</b>        | 021 31 44 209   |
| <b>Site web</b>         | <a href="#">Hématologie moléculaire</a>                   |

### Résultats

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Délai de rendu</b> | 1-2 semaines   |
| <b>Interprétation</b> | Polyclonal, monoclonal, monobclonal, rapport médical |



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

ADN: 5 ans

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

311.4