

Catalogue des analyses - Laboratoire

Réticulocytes

Sang veineux

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
------------------------------	--

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">• Sang capillaire• Sang veineux
---------------	--

Instruction(s) particulière(s)	Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)
---------------------------------------	--

Matériel standard

Quantité	1
-----------------	---

Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K
------------------	--------------------





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Même monovette avec "autres éléments de FSS"

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Contenant(s) autre(s)	tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant	24h
----------------	-----

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
--------------------------------	----------------------------

Site	BH18-100
-------------	----------

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	----------------------------

Pneumatique	439
--------------------	-----

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
--	--------

Téléphone	021 31 44 280
------------------	---------------

Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>
-----------------	--



Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web [Hématologie générale 24/7](#)

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation Paramètres testés: réticulocytes %, réticulocytes absolu, fraction réticulocytes immatures, réticulocytes immatures, concentration en hémoglobine des réticulocytes.
Peut être automatiquement ajouter selon certains critères de la FSS (nouvelle anémie, agglutinines froides, ..)

Méthode analytique

Principe de la méthode • Cytométrie de flux par laser semiconducteur

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF) 11.9

Condition(s) spéciale(s) Une FSS est toujours associée à un comptage des réticulocytes. Il faut donc ajouter au minimum 8.10 CHF à ce prix