

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Temps de prothrombine

## Informations générales

### Examen

<b>Ajout d'analyse</b>	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 200
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hémostase</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Quick, INR
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Cocher si patient à reçu des anticoagulants oraux

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

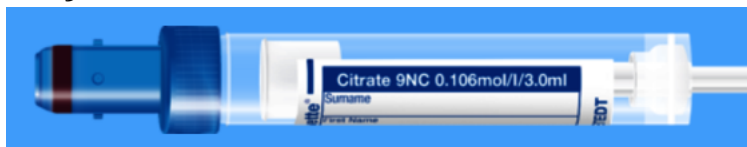

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

### Résultats

**Délai de rendu** < 2h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Néphélométrie



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 24 heures

### Tarif

**Tarif (CHF)** 5.4