

Catalogue des analyses - Laboratoire

Temps de thrombine

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hémostase
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Cocher si patient à reçu anticoagulants

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

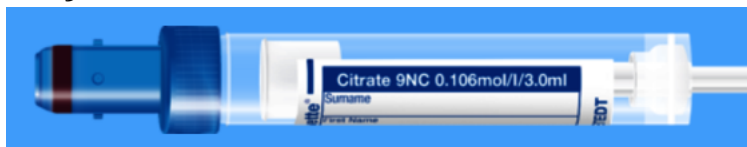

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Hématologie générale 24/7
Site	BH18-100
Adresse	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 31 44 200
Site web	<u>Hématologie générale 24/7</u>

Résultats

Délai de rendu	< 2h
Interprétation	Temps de thrombine

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> Néphélémétrie
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	24 heures
Tarif	
Tarif (CHF)	8.28