

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Temps de thromboplastine partielle activée

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 200

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Hémostase

**Synonyme** APTT, APTT=Activated Partial Thromboplast, héparine, PTT, PTT=Partial Thromboplastin Time, TCA, temps coagulation, temps de céphaline activée, temps thromboplastine part. activée

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
999071  
**Lien**  
[023 - Hématologie hémostatse](#)

**Renseignements à fournir** Cocher si patient à reçu de l'héparine

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

**Stabilité maximale avant analyse**

**Ambiant**

4h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

**Conservation**

Aliquots à -20°C

**Conditions d'acheminement**

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Hématologie générale 24/7

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 200

**Site web** [Hématologie générale 24/7](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 2h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Néphélométrie

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 24 heures

### Tarif

**Tarif (CHF)** 7.83