

Catalogue des analyses - Laboratoire

Alpha-foetoprotéine (AFP) liquide amniotique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Tube neuronal - défauts de fermeture
Indication diagnostique	sytématique sur les LA jusqu'à 26 6/7 SA
Préparation du patient	Amniocentèse. Le patient doit se rendre aux US
Renseignement téléphonique	Médecin du service de médecine génétique (conseil génétique): 021 314 32 00 Laboratoire de chimie clinique : 021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Fréquence d'analyse: 2 à 3 fois par semaine
Analyse accréditée	OUI
Analyse sous-traitée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Génétique constitutionnelle
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial
Renseignements à fournir	âge gestationnel aux US lors du prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide amniotique

Instruction(s) particulière(s)

Interférence: souillure par du sang fœtal

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Contactez le laboratoire

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Réfrigéré

Oui



Congelé	Non
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	ne pas stocker
Conditions d'acheminement	Par transporteur ou par poste express 24 h
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Pas d'envoi par pneumatique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1 semaine
Interprétation	Avec le caryotype ou sur demande du médecin, interprétation par un FAMH en génétique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">FIA Kryptor Trace
Analyseur	Kryptor de Thermofisher

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	17.37
--------------------	-------