

Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage de germes producteurs d'ESBL ou carbapénémase

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cet examen comprend une recherche spécifique de germes producteurs d'ESBL ou de carbapénémase
Indication diagnostique	Cette recherche s'effectue selon les directives de l'unité Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Les motivations pour cette recherche figurent sur le bon d'analyse. Elles peuvent être effectuées en urgence pour des motifs appropriés selon les mêmes directives.
Renseignement téléphonique	021 31 40 260
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Hygiène prévention et contrôle de l'infection
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260
Renseignements à fournir	Motivation. Sans cette information, l'analyse ne sera pas effectuée.
Recommandations	Un bon par prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis

Instruction(s) particulière(s)

Frottis rectal:

- Insérer l'écouvillon dans le rectum, tourner 2X et le retirer
- Insérer l'écouvillon dans le tube, le casser au point de marquage et le laisser dans le tube
- Fermer le tube avec le capuchon

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Nuit

Réfrigéré

Weekend (2 nuits)

Acheminement

Conditions d'acheminement

Envoi dans une pochette kangourou, le prélèvement doit être séparé du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire d'épidémiologie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 12h00 ; 13h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h00 uniquement pour urgences

Téléphone 021 31 40 260

Site web [Epidémiologie](#)

Résultats

Interprétation Il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur la présence d'autres germes pathogènes.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture sur des milieux sélectifs