



Catalogue des analyses - Laboratoire

Pathologie chirurgicale

Biopsies de greffons (myocardiques, pulmonaires et hépatiques)

Informations générales

Examen

But de l'analyse Examen Anatomo-pathologique d'un échantillon tissulaire

Renseignement téléphonique 021 31 47 190

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée NON

Spécialité

- Anatomo-histo-cyto-pathologie

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
Lien
[102 - Pathologie - Histologie](#)
Lien
[102 - Pathologie - Histologie](#)

Renseignements à fournir **Obligatoires :**
Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Tissu

Instruction(s) particulière(s)

1. Biopsies myocardiques, pulmonaires :

- a. Contenant n°1 : déposer 1 biopsie dans le pot stérile, contenant 30 ml de NaCl 0,9% (en dehors des horaires d'ouverture, fixer l'échantillon en formol tamponné 4%)
- b. Contenant n°2 : déposer 4 biopsies dans le flacon contenant du formol tamponné 4%

2. Biopsies hépatiques :

- Déposer **la ou les biopsie(s)** dans le pot stérile, contenant 30 ml de NaCl 0,9% (en dehors des horaires d'ouverture, fixer l'échantillon en formol tamponné 4%)

Attention : le délai entre le prélèvement et la prise en charge /fixation peut influencer sur les analyses

Matériel standard

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Biopsies formolée : max 1h

Réfrigéré

Biopsie fraîche : max 1h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Maintenir dans les conditions ci-dessous jusqu'à l'acheminement à l'IPA :

- Biopsie fraîche : sur glace
- Biopsie formolée : ambiant

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie :

- Biopsie fraîche : sur glace
- Biopsie formolée : ambiant

Acheminement

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie

- Biopsie fraîche : sur glace
- Biopsie formolée : ambiant

Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Histopathologie

Site

BU25-02-212

Adresse

CHUV-Institut de Pathologie
Laboratoire de pathologie chirurgicale
Rue du Bugnon 25
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 47 190

Site web

[Pathologie - Réception/Histopathologie](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Institut de Pathologie / Laboratoires de Pathologie Clinique

Site IPA/BU25

Adresse CHUV-Institut de Pathologie
Service de Pathologie Clinique
Rue du Bugnon 25
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 47 111

Site web [Pathologie - Pathologie clinique](#)

Résultats

Interprétation Par un pathologiste de l'IPA