



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Pathologie chirurgicale

Biopsies musculaires

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Examen Anatomo-pathologique d'un échantillon tissulaire

**Remarques :** la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : [iup.secretariat@chuv.ch](mailto:iup.secretariat@chuv.ch).

#### Renseignement téléphonique

0210314 71 90

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Anatomo-histo-cyto-pathologie

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[102 - Pathologie - Histologie](#)

#### Renseignements à fournir

**Obligatoires :**

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Tissu

#### Instruction(s) particulière(s)

Déposer le(s) prélèvement(s) dans le pot stérile contenant une gaze humidifiée avec du NaCl 0.9%, le tout sur glace. Echantillon de 0.5 x 0.5 x 0.5 cm minimum

**Attention :** le délai entre le prélèvement et la prise en charge /fixation peut influencer sur les analyses

### Matériel standard

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Conservation

Maintenir dans les conditions ci-dessous jusqu'à l'acheminement à l'IPA :

- Biopsie fraîche : sur glace
- Biopsie congelée : sur glace sèche

### Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie :

- Biopsie fraîche : sur glace
- Biopsie congelée : sur glace sèche

### Acheminement

### Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie:

- Biopsie fraîche : sur glace
- Biopsie congelée : sur glace sèche

## Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Histopathologie

### Site

BU25-02-212

### Adresse

CHUV-Institut de Pathologie  
Laboratoire de pathologie chirurgicale  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

### Horaires d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

### Téléphone

021 31 47 190

### Site web

[Pathologie - Réception/Histopathologie](#)

## Analytique

### Prestataire

### Prestataire

Institut de Pathologie / Laboratoires de Pathologie Clinique

### Site

IPA/BU25

### Adresse

CHUV-Institut de Pathologie  
Service de Pathologie Clinique  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

### Horaires d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

### Téléphone

021 31 47 111

### Site web

[Pathologie - Pathologie clinique](#)

### Résultats

### Interprétation

Par un pathologiste de l'IPA