Catalogue des analyses - Laboratoire  $\begin{array}{c} DLA\_INV\_01\_00311 \\ V14 - 01/12/2025 \end{array}$ 

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Pathologie chirurgicale**

Biopsies musculaires



# Informations générales

#### **Examen**

D	4-	l'analyses
Buι	ue	l'analyse

Examen Anatomo-pathologique d'un échantillon tissulaire Remarques: la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie: <a href="mailto:iup.secretariat@chuv.ch">iup.secretariat@chuv.ch</a>.

## Renseignement téléphonique

0210314 71 90

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

• Anatomo-histo-cyto-pathologie

### **Prescription**

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

<u> 102 - Pathologie - Histologie</u>

#### Renseignements à fournir

#### Obligatoires:

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats

# Pré analytique

#### **Prélèvement**

Nature	• Tissu
Natuic	

#### Instruction(s) particulière(s)

Déposer le(s) prélèvement(s) dans le pot stérile contenant une gaze humidifiée avec du NaCl 0.9%, le tout sur glace. Echantillon de 0.5 x 0.5 x 0.5 cm minimum

**Attention** : le délai entre le prélèvement et la prise en charge /fixation peut influer sur les analyses

#### Matériel standard

#### **Contenant**

Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

# Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Maintenir dans les conditions ci-dessous jusqu'à l'acheminement à l'IPA :

• Biopsie fraîche: sur glace

• Biopsie congelée : sur glace sèche

#### **Conditions d'acheminement**

A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie :

• Biopsie fraîche : sur glace

• Biopsie congelée : sur glace sèche

### **Acheminement**

#### **Conditions d'acheminement**

A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie:

• Biopsie fraîche: sur glace

• Biopsie congelée : sur glace sèche



Dépose des prélèvements	Institut de Pathologie / Réception Histopathologie
Site	BU25-02-212
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de pathologie chirurgicale Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 190
Site web	<u>Pathologie - Réception/Histopathologie</u>

# **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoires de Pathologie Clinique
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Site web	<u>Pathologie - Pathologie clinique</u>
Résultats	
Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA

