



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Pathologie chirurgicale

Autres biopsies fraîches

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Examen Anatomo-pathologique d'un échantillon tissulaire  
**Remarques** : la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : [iup.secretariat@chuv.ch](mailto:iup.secretariat@chuv.ch).

#### Renseignement téléphonique

021 31 47 190

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Anatomo-histo-cyto-pathologie

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[102 - Pathologie - Histologie](#)

#### Renseignements à fournir

**Obligatoires** :

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Tissu

#### Instruction(s) particulière(s)

Déposer la (les) biopsie(s) dans le pot stérile, contenant 30 ml de NaCl 0,9%  
(en dehors des horaires d'ouverture, fixer l'échantillon en formol tamponné 4%)

**Attention** : le délai entre le prélèvement et la prise en charge /fixation peut influencer sur les analyses

### Matériel standard

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Biopsie fraîche : max 1h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Maintenir sur glace jusqu'à l'acheminement à l'IPA

#### Conditions d'acheminement

A acheminer sur glace et sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

A acheminer sur glace et sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie

#### Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Histopathologie

#### Site

BU25-02-212

#### Adresse

CHUV-Institut de Pathologie  
Laboratoire de pathologie chirurgicale  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

#### Téléphone

021 31 47 190

#### Site web

[Pathologie - Réception/Histopathologie](#)



# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Institut de Pathologie / Laboratoires de Pathologie Clinique
<b>Site</b>	IPA/BU25
<b>Adresse</b>	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 47 111
<b>Site web</b>	<a href="#">Pathologie - Pathologie clinique</a>

## Résultats

**Interprétation** Par un pathologiste de l'IPA