Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie


Liquide Céphalo-Rachidien (LCR)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes dans un liquide céphalo-rachidien (LCR) Attention: la numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différentiation leucocytaire » Remarques: la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : iup.secretariat@chuv.ch .
Renseignement téléphonique	021 31 47 145
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Anatomo-histo-cyto-pathologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique Lien 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique
Renseignements à fournir	Obligatoires : Nom Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats - Volume de LCR ajouté au CytoLyt®
Recommandations	Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire prestataire. Attention : ne pas utiliser ce formulaire si « numération répartition



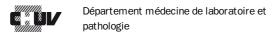

Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_00316 \\ V15-01/12/2025 \end{array}$

cellulaire et l'hématocrite» sont demandés sur du LCR, car ces analyses sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différentiation leucocytaire »



Pré analytique

Prélèvement

Nature

• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Instruction(s) particulière(s)

Mettre 2 ml de LCR dans un tube de 15ml CytoLyt $^\circledR$ à bouchon vert pour envoi au laboratoire Cytologique de l'IPA

Attention: si une numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont demandées : ne pas mettre la totalité du LCR natif dans le tube $CytoLyt^{\textcircled{\$}}$:

Mettre 2 ml de LCR natif dans le CytoLyt® pour la Cytologie et le

volume restant est envoyé natif aux autres labo concernés

Matériel standard

Contenant Tube CytoLyt



Sur demande au tél 66 295

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 3 semaines

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Maintenir à température ambiante jusqu'à l'acheminement à l'IPA
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologique de l'IPA
Acheminement	
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA
Dépose des prélèvements	Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie
Site	BU25-03-212
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de cytopathologie Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé



Téléphone	021 31 47 324
Site web	Pathologie - Réception/Cytopathologie
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique
	Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Astreinte	Pathologie Cytopathologie
Résultats	
Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA

